

Kamasept Spray – Schnelldesinfektion

Produkt

Kamasept Spray ist ein gebrauchsfertiges, aldehydfreies Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis zur Schnelldesinfektion von Flächen und Gegenständen

- ◆ mit der ultrakurzen Einwirkzeit von 30 sec
- ◆ bakterizid, fungizid, virusinaktivierend (inkl. HBV und HIV)
- ◆ frei von Aldehyden, Chlor, Phenol und Alkali
- ◆ für alle alkoholbeständigen Flächen und Gegenstände
- ◆ sehr gute Benetzung => auch für schwer zugängliche Flächen
- ◆ geprüft und gelistet nach den DGHM-Richtlinien



Anwendungen

Kamasept Spray dient zur umfassenden Kurzzeit-Desinfektion von alkoholbeständigen Flächen und Gegenständen. Kamasept Spray hat sich bewährt in Krankenhäusern, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen sowie zur Schnelldesinfektion von Rettungswagen. Auch für den Einsatz in Großküchen und Gemeinschaftseinrichtungen ist Kamasept Spray zu empfehlen.

Verwendungszweck

Alle zu behandelnden Flächen und Gegenstände gleichmäßig bis zur vollständigen Benetzung einsprühen. Die zu behandelnden Flächen trocknen lassen. Zur Abtötung der Keime gemäß DGHM-Liste reicht eine Einwirkzeit von 30 sec. Aus. Es bilden sich keine Belagrückstände.

Wichtige Hinweise

Nicht auf Acrylglas (Plexiglas®) anwenden. Zur Desinfektion von Acrylglas (Plexiglas®) verwenden Sie Nüscosept® Spray oder Nüscosept® SBK. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Gebindegröße 1 und 5 Liter Kunststoff-Rücknahmebehälter

Lagerung Im verschlossenen Originalgebinde. Lagerraum sollte trocken und nicht unter 0° C sein.

Sicherheit Vor unbefugtem Zugriff schützen. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Produkt-aufkleber beachten! Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt nach EG Nr. 1907/2006.

Artikel-Nr. LW 45040, LW 45041

Produkt der Dr. Nüsken Chemie GmbH - 59174 Kamen