

KAMASEPT

SPRAY

Gebrauchsfertiges, aldehydfreies Schnelldesinfektionsmittel auf Basis ausgesuchter Alkohole für alle beständigen Flächen und Gegenstände. (DGHM-geprüft und VAH-gelistet).



- ✓ VAH- und IHO-gelistet
- ✓ bakterizid - fungizid - begrenzt viruzid
- ✓ wirksam gegen Noro-, Rota- und Influenza-A-Viren
- ✓ ultrakurze Einwirkzeit von 30 sec
- ✓ auf Basis von Bio-Alkoholen

<u>Art.-Nr.</u>	<u>Verkaufseinheit</u>
001205	VE 2 x 5 L Kunststoff-Kanister
001362	VE 12 x 1 L Keulenflasche

weitere Gebinde auf Anfrage

Anwendung

KAMASEPT SPRAY dient zur umfassenden Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Flächen und Gegenständen. Es hat sich bewährt in Krankenhäusern, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen sowie in Rettungswagen. Auch für den Einsatz in Großküchen und Gemeinschaftseinrichtungen geeignet.

Gebrauchsanweisung

KAMASEPT SPRAY in ein Einmaltuch geben oder getränkte Vliestücher verwenden. Zu desinfizierende Flächen gleichmäßig und vollständig benetzen. Anschließend einwirken lassen und Flächen abtrocknen lassen. Zur Abtötung der Keime reicht eine Einwirkzeit von 30 sec. aus. Bei Acrylglas (Plexiglas) NÜSCOSEPT SBK verwenden.

Zusatzbegutachtungen

Noro-Viren: 30 sec (geringe Belastung), Rota-Viren: 15 sec, HCV (BVDV): 15 sec, HBV (inkl. HIV): 5 min, Vaccinia: 15 sec, Begrenzte Viruzidie: 15 sec, TBC: 30 sec (mit Mechanik, hohe Belastung).

Inhaltsstoffe

100 g Lösung enthalten: 50,0 g Ethanol, 0,25 g Didecyl-dimethyl-ammoniumchlorid.
weitere Inhaltsstoffe: Duft- und Hilfsstoffe

wichtige Hinweise

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Umweltverträglichkeit

Dieses Desinfektionsmittel entspricht den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben und ist bei der BAuA angemeldet. Die Gebinde aus Polyethylen werden gereinigt der Weiterverwendung zugeführt.

Weitere Produkte

Zur leichteren Applikation empfehlen wir den Einsatz unserer VLIESTUCHSPENDER. Für Acrylglas, z.B. Sonnenbänke, sollte NÜSCOSEPT SBK verwendet werden.

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender wegen der Fülle von Anwendungsmöglichkeiten nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung von Produkteigenschaften oder Einsatzzwecken kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Weitere Informationen über unsere Produkte erhalten Sie unter www.drnuesken.de.

Stand: 01.02.2017